

Fiche technique– Masque Chirurgical Type II



Masque chirurgical Type II :

Type II - 3 plis et élastiques - non stérile - à usage unique

Indications :

- Destinés à éviter lors de l'expiration de celui qui le porte, la projection de sécrétions des voies aériennes supérieures ou de salive pouvant contenir des agents infectieux transmissibles par voie de gouttelettes (transmission par des gouttelettes de salive ou de sécrétions des voies aériennes supérieures), ou par voie aérienne (transmission aéroportée par de fines particules de moins de 5 microns).
- Utilisés dans des blocs opératoires et dans d'autres installations de soins de santé.
- **ATTENTION ! Ce produit n'est pas un équipement de protection individuelle mais un dispositif médical.**

Caractéristiques techniques :

- Matériaux doux, hypoallergéniques, sans latex et sans fibre de verre,
- Trois couches en polypropylène : une face externe, un filtre et une face interne,
- Élastique de fixation : en caoutchouc,
- Barrette nasale : métallique et recouverte de plastique,
- Soudure par ultrason,
- Temps de port conseillé : 4 heures maximum.
- Règlementation :
 - Marquage CE pour les dispositifs médicaux de classe I selon Directive Européenne 93/42/CEE.
 - Conforme à l'EN14683+AC type II
- Entretien : sans entretien, dispositif à usage unique.
- Durée de vie : 5 ans à partir de la date de fabrication.
- Modèles et références :

Modèle/Taille	Dimensions (+/- 5mm)	Coloris			
		BLEU	NOIR	BLANC	ROSE
TAILLE ADULTE	175 x 95	Ref. CHIR-B-ER-50-TYPE II Ref. CH2A1EB01	Ref. CHIR-N-ER-50-TYPE II Ref. CH2A1EN01	Ref. CHIR-W-ER-50-TYPE II Ref. CH2A1EW01	Ref. CHIR-P-ER-50-TYPE II Ref. CH2A1EP01
TAILLE ENFANT	145 x 95	Ref. CH2E1EB01	Ref. CH2E1EN01	Ref. CH2E1EW01	Ref. CH2E1EP01

Précautions d'emploi :

NOTA : Dans le cas du modèle ENFANT, l'utilisation du produit dans le respect des consignes ci-après nécessite la supervision d'un adulte

- Lorsque l'on porte un masque : éviter de le toucher ou de le déplacer.
- Le masque doit être jeté dès qu'il est mouillé, souillé ou retiré (même temporairement).
- Ne pas réutiliser un masque usagé.
- Les masques doivent être de préférence jetés dans une poubelle si possible équipée d'un couvercle et munie d'un sac plastique. L'élimination se fait par la filière des ordures ménagères.

Mode d'emploi :



- ① Avant toute utilisation de masque, se laver les mains avec de l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydro alcoolique. Respectez les sens d'utilisation du masque : la barrette nasale doit être orientée vers le haut et l'inscription "Made In France" doit être lisible de l'extérieur.
 - ② Attraper le masque par les boucles élastiques et positionner les boucles élastiques autour des oreilles en veillant à recouvrir le nez et la bouche avec le masque.
 - ③ Tirer le masque en saisissant les parties supérieure et inférieure afin de déplier entièrement le plissé du masque chirurgical (cela permet entre autre de réduire au maximum le nombre de couches au travers desquelles respirer).
 - ④ Former la barrette nasale avec les doigts afin de réduire le passage d'air.
 - ⑤ Veiller à ajuster au mieux le masque sur votre visage, il doit être appliqué du haut du nez au-dessous du menton.
- Pour retirer le masque, l'enlever par les boucles élastiques comme sur l'image ② (ne pas toucher le devant du masque). Le jeter immédiatement puis se laver les mains avec de l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydro alcoolique.

Fabricant :

AHG MEDICAL

Marque :

AURIOL
MASQUES