
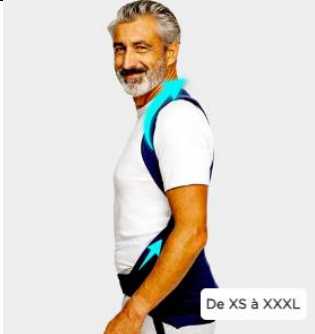



FICHE TECHNIQUE PROTEC NORD	REFERENCE 106LYPROH
	<p>GILET HOMME MAINTIEN POSTURE DOS LYNE PRO - PERCKO</p>

REFERENCE PROTECNORD : 106LYPROH / REFERENCE FABRICANT : LYNE_RPO

DESIGNATION : GILET HOMME MAINTIEN POSTURE DOS LYNE PRO - PERCKO

PRODUIT DE CLASSE : I

<p>• COMMENT PORTER LYNE PRO?</p>  <p>A Enfiler Lyne PRO comme un gilet classique. Faire les attaches le plus bas possible pour permettre à la fois de régler tout le volume du porteur.</p> <p>B Ajuster les attaches et régler le serrage des bretelles. Le tissu du gilet doit être plaqué contre le corps (sans être ni trop lâche ni trop serré) pour assurer l'efficacité de son maintien.</p> <p>C Pour sentir les effets de Lyne PRO, effectuer une rotation de haut du corps d'un côté puis de l'autre sans bouger le bassin. Votre dos est protégé!</p>	 <p>De XS à XXXL</p>	 <p>ture à scratch</p>
--	---	---

DESCRIPTION :

Le **gilet de protection du dos** pour homme LYNE PRO de Percko protège le dos en encourageant à adopter les bons gestes et les bonnes postures pendant et entre les mouvements. Lyne Pro encourage l'ouverture du thorax et repositionne la colonne vertébrale en fin de mouvement. Il **diminue les douleurs de dos, réduit le risque de blessure et réduit la fatigue musculaire.**

Il faut savoir que le mal de dos en entreprise concerne 80% de la population, et il est la 1ère cause d'arrêt de travail pour les moins de 45ans. 80% des maux de dos sont liés à de mauvaises habitudes posturales. C'est pour cela que ce gilet anti mal de dos a été adopté par de nombreuses grandes entreprises !

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

MATIERE	Polyamide (78%) / Elasthane (22%)
TAILLE	XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL
POIDS	190 g/m ²
CONDITIONNEMENT	UNITAIRE

Entretien :

Lavable en machine à 30°C

Ne peut pas être séché en machine, repassé ou nettoyé à sec

Contre-indications

Une pathologie entraînant une faiblesse articulaire, tendineuse et osseuse du tronc et du membre supérieur.

Une maladie inflammatoire aigüe et/ou entorse d'une ou plusieurs articulations du membre supérieur ou du tronc.

Une fracture tassement d'une ou plusieurs vertèbres de moins de 3 mois ou non consolidée.

Une arthropathie dégénérative.

La maladie de Paget.

Une sténose du canal radiculaire.

Une spondylarthrite ankylosante.

Une opération chirurgicale récente, non cicatrisée du tronc ou du membre supérieur.

Une rupture tendineuse ou ligamentaire, partielle ou complète, des membres supérieurs ou du tronc, de moins de 2 mois.

En cas de doute, demandez systématiquement l'avis de votre médecin traitant.

Précautions d'usage

Demander l'avis de votre médecin avant utilisation en cas de :

Grossesse

Ostéoporose